

# Hämatokrit HCT 142

Probenmaterial: Kapillarblut / Vollblut

Seite 1




1



10  $\mu$ l Blut mit der Kapillare aus der Fingerbeere entnehmen

2

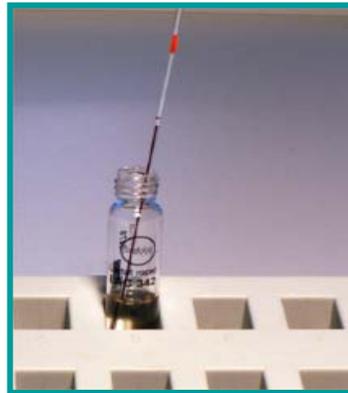

Kapillare in die Kuvette stellen

3



Blut mit Mikropipetter ausstoßen

4



Türkisfarbene Verschlusskappe wieder aufschrauben  
Kuvette mehrmals über Kopf schwenken  
3 min. warten

# Hämatokrit HCT 142

Probenmaterial: Kapillarblut / Vollblut

Seite 1



5



Gerät einschalten  
Enter drücken  
Test anwählen und  
mit Enter bestätigen

6



Unbearbeitete Küvette aus  
der Testpackung in das  
Photometer stellen  
(Nullpunkteinstellung)  
Nach Signalton Küvette  
entfernen

7



Küvette mit  
Blutprobe (Bild 4)  
in das Photometer  
stellen

8



Ergebnis ablesen und  
ggf. Messprotokoll mit  
DiagWin auf PC  
erstellen