

Medizid® Rapid QF Flowpack

Unsere hochwertigen aldehyd- und alkoholischen,
zu 100% biologische abbaubaren Hygienetücher



Varianten

REF	Größe	Stück pro Packung	Versandereinheit
00976FP	Ca. 22 cm x 20 cm	80 Stück	12 Packungen

Allgemeine Informationen :

Charakteristik :

- Wirksamkeit der Tränklösung Medizid® Rapid
- Gebrauchsfertig
- Aldehydfrei
- Sehr schnell und umfassend wirksam in bereits 15 sec.
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid (inkl. M.-terrae), mykobakterizid, virusinaktivierend (inkl. HBV / HIV)
- Wirksam gegen behüllte Viren: BVDV (HCV) und Vaccinia gemäß aktueller Empfehlung des RKI
- MRSA-wirksam und getestet (1 min)
- Rückstandsfrei
- Angenehmer Geruch
- Gute Materialverträglichkeit
- Viruzid wirksam gemäß 14476 (Polio / Adeno)
- Noroviren und SV 40 getestet

Für alle alkoholbeständigen Medizinprodukte, Oberflächen und Gegenstände, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen, und Pflegebereichen

Zusammensetzung:

In 100g sind enthalten:
50 g Ethanol

Haltbarkeit:

28 Tage nach Anbruch, nur feuchte Tücher für die Desinfektion verwenden.

Allgemeine Hinweise:

Vorsicht bei alkoholempfindlichen Material.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit, sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.

Anwendungshinweise

Medizid® Rapid QF Desinfektionstücher (Flowpack) sind mit der sehr schnell wirkenden Flüssigkeit des alkoholischen Präparats Medizid® Rapid getränkt.

Die Hygienetücher eignen sich deshalb sehr gut zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten wie Geräteoberflächen und Gegenstände im medizinischen Bereich und im patientennahen Umfeld zwischen Behandlungen und Eingriffen.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de