

R16500

Krankenpflegepuppe "KEIKO"

Bedienungs Anleitung



Inhalt

- **Einleitung**
 - Herstellernotizen S.1
 - Was Sie tun und lassen sollten
- **Bevor Sie beginnen**
 - Lieferumfang S.2
- **Vorbereitung**
 - Zusammenbau S.3-S.4
 - Männliches und weibliches Modell S.5-S.7
- **Übungen**
 - Positionierung P.8-S.9
 - Lagerungsdrainage
 - Waschen / Haarpflege / Mundpflege P.10
 - Mundpflege / Druckgeschwürversorgung S.11
 - Itimpflege / Blasenkatheter S.12
 - Blasenkatheter / Einlauf P.13-S.14
 - Künstliche Ernährung P.15
 - Luftwege absaugen Q.16-S.17
 - Luftwege absaugen / Stomapflege P.18
 - Zäpfchengabe / Sauerstoffgabe S.19
 - Portpflege / Postmortale Versorgung S.20
- **Nach der Übung**
 - Zerlegen der Puppe und Lagerung S.20
 - Lagerung S.21

Anmerkungen

“KEIKO” ist eine Vielzweckpuppe zum Unterrichten und Lernen von klinischen und pflegerischen Prozeduren. Die Puppe kann selbständig aufrecht sitzen. Weiche, lebenssechte Materialien und nahtlose Extremitäten bieten realistische praktische Übungsmöglichkeiten.

Achtung

Diese Pflegepuppe “KEIKO” wurde entwickelt für das Training von medizinischem und paramedizinischem Fachpersonal. Jegliche anderweitige Benutzung oder auch die Benutzung welche nicht dieser Anleitung folgt, wird auf keinen Fall empfohlen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Beschädigungen, welche als Folge der falschen Benutzung auftreten. Bitte benutzen Sie das Modell vorsichtig und vermeiden Sie unnötige Belastungen oder Verschleiß.

Features

- Tägliche Grundpflege kann mit dieser Ganzkörperpuppe demonstriert werden. Mundpflege, Druckgeschwürpflege, Positionierung, Intimpflege und anderes.
- Als medizinische Pflege kann die orale Atemwegsabsaugung sowie die Tubushandhabung bei nasaler und Tracheotomieabsaugung geübt werden.
- Das Ganzkörpermodell erlaubt es, Kommunikationstraining und richtige Handhabung des Patienten zu üben.
- Die Puppe kann entweder männlich oder weiblich gemacht werden um in das Übungsszenario zu passen. Der Ober- und Unterkörper können für Lagerung und Transport getrennt werden.

Was Sie tun und lassen sollten

Was Sie tun sollten

- Handhaben Sie die Puppe vorsichtig
- Lagern Sie die Puppe an einem dunklen, kühlen Raum, damit sich die Hautfarbe nicht verändert.
- Die Puppe sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Falls nötig können Sie eine milde Seifenlösung verwenden.


Was Sie lassen sollten

- Lassen Sie keine Farbe von Kugelschreibern, Zeitungen, dieser Anleitung oder ähnlichem in Kontakt mit der Puppe kommen. Diese kann nicht wieder entfernt werden!
- Benutzen Sie keine organischen Reiniger wie Verdünnung um die Haut zu reinigen, dies wird die Puppe dauerhaft beschädigen.
- Selbst wenn die Oberflächenfarbe der Puppe mit der Zeit ausbleicht, hat dies keine Auswirkung auf die Funktion der Puppe. Lagern Sie die Puppe trotzdem an einem dunklen Ort.
- Lassen Sie keine Verbände oder Pflaster auf der Puppe. Der Klebstoff kann die Oberfläche klebrig machen.

Lieferumfang

Bevor Sie starten, stellen Sie sicher, dass sie die folgenden Dinge haben:


● Puppe

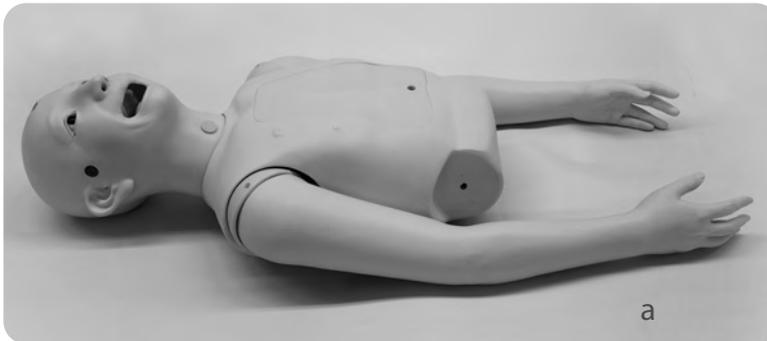

Oberkörper
Kopf
Augen
Tracheotomiestopfen
Torso
Brustabdeckung
Arme



Unterkörper
Abdomen
Stoma
Weibliches Genital
Genitalien
2 Stopfen
Rektalbehälter
Beine

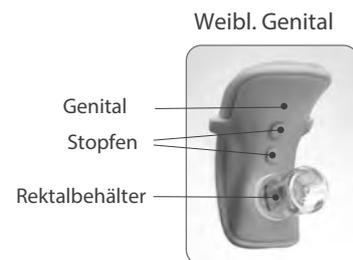

● Teile




- | | | | |
|------------------|---------|--|-------------|
| a. Oberkörper | 1 | f. Männl. Genital | 1 |
| b. Unterkörper | 1 | g. Slip | 1 |
| c. Perücke | 1 | h. Montagesatz | 1 Set |
| d. Gebiß | 1 | i. Gleitmittel für Puppe | 1 |
| e. Mundabdeckung | 1 | j. Gleitmittel für Puppe (Katheterisierung,
Einlauf und Zäpfchengabe) | 1 |
| | | k. Bedienungsanleitung | |

1 Auspacken

1. Packen Sie die Puppe in einer geräumigen Umgebung aus.
Entfernen Sie die Teiler, um den Oberkörper und die Teile zu entnehmen.

Oberer Teil der Kiste

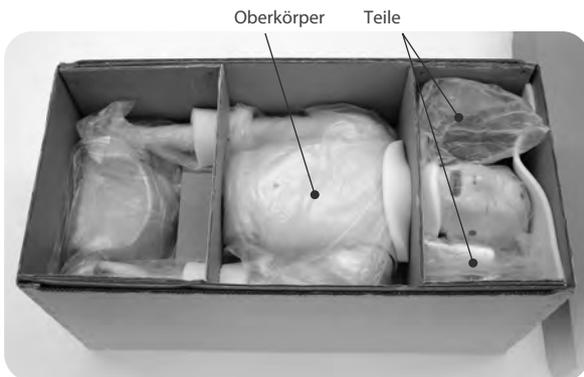

Unterer Teil der Kiste



2. Der Unterkörper ist im unteren Teil der Kiste. Entnehmen Sie die Teiler, um ihn zu entnehmen




Achtung

.....
Transportieren Sie die Puppe vorsichtig.
Bewahren Sie die Teiler für die Lagerung auf.




2 Zusammenbau

1. Zusammenbau des Ober- und Unterkörpers.
① Öffnen Sie die Brustabdeckung durch Ziehen der Lasche



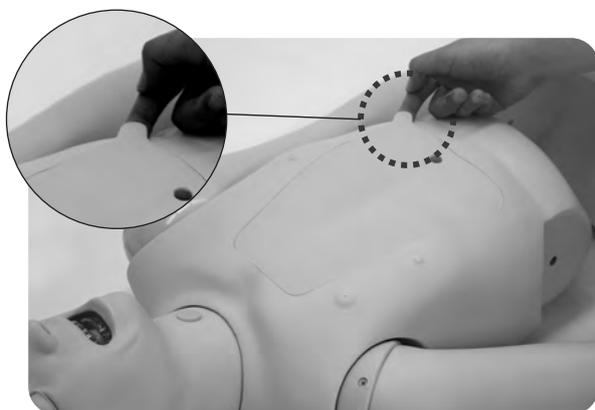


2 Zusammenbau

- ② Bewegen Sie beide Arme nach oben, um die Puppe zusammenzufügen.
Schieben Sie den Oberkörper in den Unterkörper bis die Bolzenlöcher übereinstimmen.

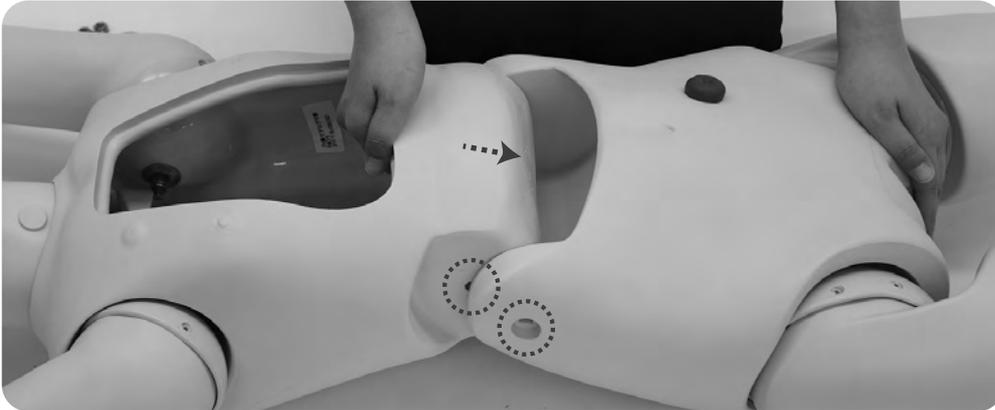


2. Schieben Sie den Bolzen von Außen ein und bringen Sie innen die Unterlagscheibe an.
Befestigen Sie in mit zwei Muttern. Schrauben Sie zuerst die Konvexe Mutter auf den Bolzen.
Schrauben Sie jetzt die Konkave Mutter auf den Bolzen und Ziehen Sie sie mit dem Schlüssel fest.

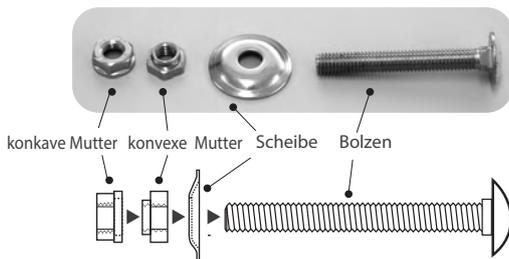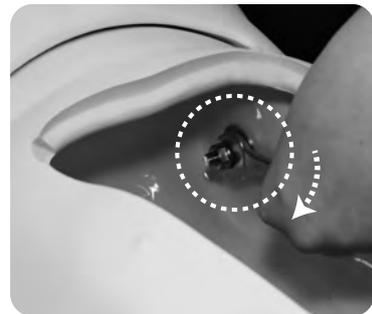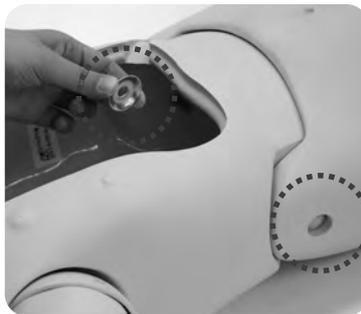

Achtung

.....
Ziehen Sie die Mutter nur solange fest, bis sich der Bolzen mitdreht. Zu festes Zudrehen beschädigt den Kunststoff der Puppe.

● Fertig

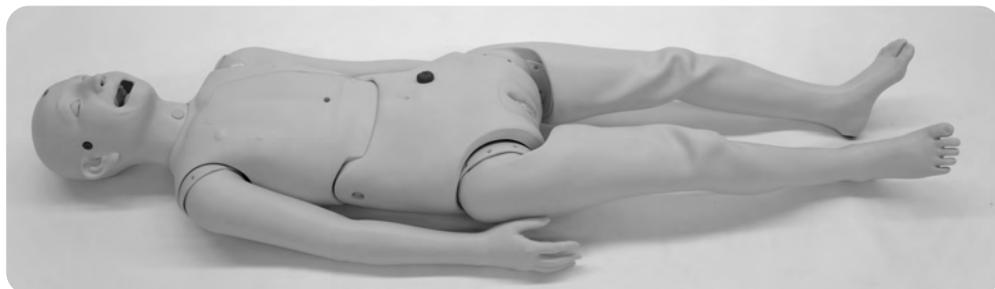

1 Männl. und weibl. Version

Die Puppe kann entweder männlich oder weiblich sein, passend zum Szenario.


Männlich : mit männl. Genital und ohne Perücke

Weiblich : mit weibl. Genital und Perücke

● Männlich



● Weiblich

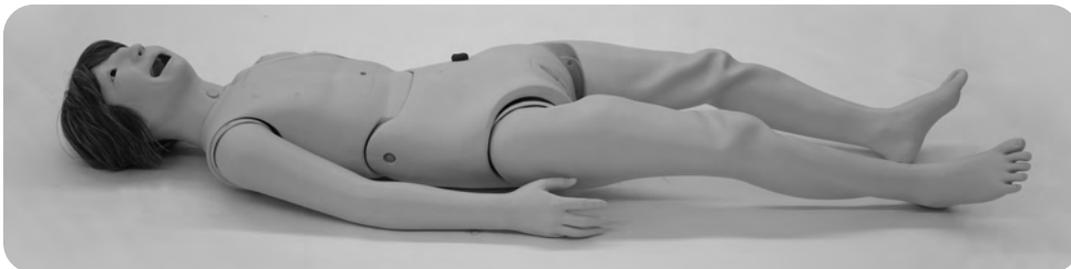

2 Anbringen der Perücke

Die Perücke wird mit den Magneten auf Stirn und neben den Ohren befestigt.

«Anbringen der Perücke»

- ① Bringen Sie die Perücke in korrekter Position an und fixieren Sie sie mit dem Magneten auf der Stirn.
- ② Befestigen Sie die Perücke mit den Magneten vor den Ohren.
- ③ Verschieben Sie die Perücke, bis sie korrekt auf dem Kopf sitzt.
- ④ Fertig.



2 Entfernen der Perücke

«Perücke abnehmen»

- ① Lösen Sie die Magnetverbindung vor den Ohren.
- ② Lösen Sie den Magneten auf der Stirn und nehmen Sie die Perücke nach hinten ab.

«Wartung»

Lagern Sie die Perücke nach folgenden Schritten:

- ① Kämmen Sie die Perücke nach Benutzung.
- ② Fügen Sie immer die Papierknäuel in die Perücke ein, damit die Form erhalten bleibt.
- ③ Rollen Sie die Haarspitzen mit der Hand nach innen.
- ④ Verstauen Sie die Perücke in die Tüte.



3 Entfernen der Genitalien

1. Entfernen des weiblichen Genitals.

- ① Ziehen Sie den oberen Teil des Genital mit dem Finger heraus.
- ② Halten Sie das Genital mit beiden Händen und ziehen Sie es nach oben heraus.



3 Auswechseln des Genitals

2. Rektalbehälter

Stellen Sie sicher, dass der Rektalbehälter fest verschlossen ist.



3. Anbringen des männl. Genitals

① Schieben Sie das Genital von oben in den Körper.



② Passen Sie die Laschen in den Körper ein



③ Passen Sie die Oberkante des Genitals in den Körper ein



1 Positionierung/ Patientenhandhabung

Weiche lebensechte Gelenke erlauben eine realistische Ausbildung in Grundtechniken wie der Positionierung und Bewegungen, Bekleidungswechsel und Lagerungsdrainage.



Achtung

.....
Vermeiden Sie Farbübertragung von Bekleidung auf die Puppe. Wählen Sie helle Kleiderfarben. Ein optionaler Schlafanzug ist erhältlich, um die Oberfläche der Puppe zu schonen.

2 Waschen im Bett

Das Üben von Waschen im Bett und Teilwaschungen (Hände und Füße) ist möglich. Das Untertauchen in einer Badewanne ist nicht möglich.



3 Haarpflege

Benutzen Sie die optionale Perücke für die Haarpflege. Die Perücke ist aus Kunsthaar und kann benutzt werden zum Üben von Waschen, Spülen, Bürsten und Fönen.

«Perücke anbringen»

Anweisungen auf Seite 5 befolgen

«Perücke abnehmen»

Anweisungen auf Seite 6 befolgen.

«Pflege»

Lassen Sie die Perücke nicht feucht liegen, sondern trocknen Sie diese immer.

Um ein Verwickeln der Haare zu vermeiden, behandeln Sie die Perücke wie folgt:

- ① Trocknen Sie die Perücke sorgfältig nach dem Waschen und bürsten Sie sie. Nachdem die Perücke getrocknet ist, können Sie Silikonspray verwenden, um ein Verwickeln zu vermeiden.
- ② Nehmen Sie die Perücke zur Lagerung ab und lagern Sie diese separat.



Achtung

.....
Nicht mit Gewalt bürsten, damit die Perücke nicht beschädigt wird.

Wasche Sie Shampoo kurzfristig wieder aus, lassen Sie es nicht längere Zeit auf der Perücke. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Wärme, da dies der Perücke schaden kann.

1 Mundpflege

Das Ganzkörpermodell ermöglicht Mundpflege in verschiedenen Situationen.

- Zähneputzen (mit Gebiss und Mundabdeckung)
- Mundmassage (ohne Gebiss mit Mundabdeckung)
- Gebisspflege (mit Gebiss)
- Zahnpflege für Patienten mit NG Tubus.

*Die Mundabdeckung kann zur Erklärung der Zahnpflege im Klassenzimmer genutzt werden.
Für Training mit Flüssigkeit die Flüssigkeit vorsichtig in die Mundabdeckung in der Puppe einfüllen.



Achtung

Stellen Sie sicher, dass die Mundabdeckung immer dann verwendet wird, wenn bei einer Übung Flüssigkeit verwendet wird. Andernfalls kann Flüssigkeit (Wasser) in die Puppe gelangen und dort Schimmel und andere Feuchtigkeitsprobleme erzeugen. Sollte trotzdem Wasser in die Puppe gelangen, öffnen Sie die Brustabdeckung und wischen Sie das Innere trocken und lassen Sie die Puppe gut trocknen.

«Anbringen der Mundabdeckung»

① Bringen Sie Gleitmittel auf die Rückseite der Mundabdeckung auf.

② Drücken Sie die Abdeckung zusammen und führen Sie sie in den Mund ein.

③ Passen Sie die Abdeckung in den Mund ein.



Achtung

Die Mundabdeckung kann nicht angebracht werden, wenn das Gebiss im Mund ist. Bringen Sie die Mundabdeckung mehr als 5 Minuten vor der Übung an, da sie ansonsten durch das frische Gleitmittel während der Übung verrutschen könnte.

1 Mundpflege

«Entfernen der Mundabdeckung»


- ① Entfernen Sie die Mundabdeckung langsam mit den Fingern



Wasche Sie die Abdeckung mit Seife oder einem Neutralreiniger nach der Übung. Lassen Sie sie gut trocknen. Vermeiden Sie Wärme und Feuchtigkeit beim Lagern.

«Anbringen der Zähne»

Sowohl das obere als auch das untere Gebiss sind mit zwei Stiften (vorne und links) im Zahnfleisch befestigt. Stecken Sie die Stifte der Gebisse in die Köcher im Zahnfleisch.

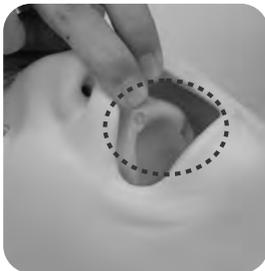

«Entfernen der Zähne»

Ziehen Sie das obere Gebiss nach unten und das untere Gebiss nach oben.


2 Druckgeschwürpflege

Die realistischen Druckgeschwüre an der Puppe erlaubt das Erklären der Varianten der Geschwüre and typischen Stellen. Das Ganzkörpermodell erlaubt das Üben der täglichen Pflege und wie Druckgeschwüre gereinigt und verbunden werden.

Positionierung
Geschwürversorgung
Windelwechsel



Benutzen Sie Wasser (keine Salzlösung) zum Üben der Reinigung.

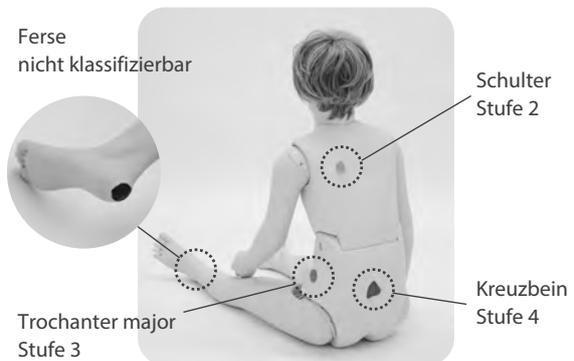

1 Intimpflege

Anatomisch korrekte Genitalien erlauben die detaillierte Pflege.

(Eichel und Vorhaut beim Mann, Große Schamlippen bei der Frau)

Passend für komplettes Training mit Kleiderwechsel, Intimpflege und Windelwechsel.



«Vorbereitung»


Stellen Sie sicher, dass der Rektalbehälter fest verschlossen ist.

Beim weiblichen Genital bitte darauf achten, dass beide Stöpsel geschlossen sind, so dass kein Wasser in die Puppe gelangt.

«Lagerung»


Nehmen Sie die Genitalien aus der Puppe und entfernen Sie den Rektalbehälter.

Waschen Sie die Genitalien und den Rektalbehälter mit Wasser und trocknen Sie beides gut vor der Lagerung.

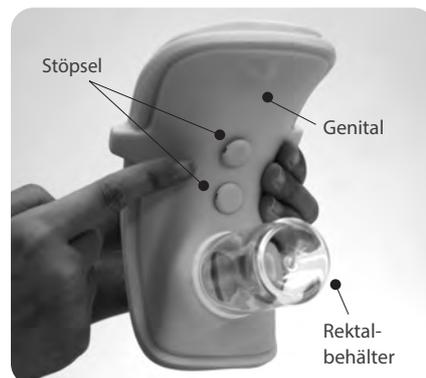

2 Blasenkatheter

Körperpositionierung Einführen des Katheters und tägliche Pflege eines Patienten mit Verweilkatheter.

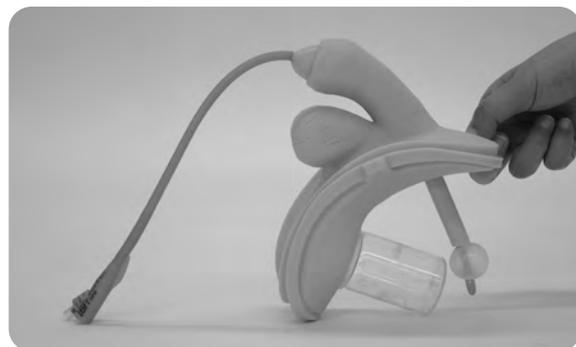


2 Blasenkatheter

«Vorbereitung»

1. Entfernen Sie die Stöpsel für das Training der weiblichen Katheterisierung.



2. Bringen Sie Gleitmittel auf der Spitze des Katheters an (etwa 5cm)

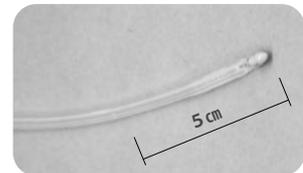

Achtung

*Empfohlene Kathetergröße: Mann 16Fr, Frau 14 Fr für Verweilkatheter
8-12Fr für Einmalkatheter

Benutzen Sie das mitgelieferte Gleitmittel für die Katheterisierung. Gleitgel oder andere Gleitmittel könnten im Genital zurückbleiben und Defekte verursachen. Benutzen Sie Wasser zur Übung der Sterilisierung anstelle echtem Antiseptikum.

«Nach der Übung»

Entfernen Sie den Katheter nach dem Training. Beim weiblichen Genital sollten Sie nach der Übung das Gleitmittel mit einer milden Seifenlösung abspülen. Nach dem Trocknen die Stöpsel anbringen und dann das Genital lagern.

Beim männlichen Genital das Gleitmittel mit einem Tuch abwischen und die Harnröhre mit milder Seifenlösung ausspülen. Trocken lagern.



3 Einlauf

Körperpositionierung und Einlaufübung.

Benutzen Sie das mitgelieferte Gleitmittel, um die Einlaufspritze einzuführen.



«Vorbereitung»

Füllen Sie saugfähige Tücher in das Rektalgefäß, um die Einlaufflüssigkeit aufzunehmen. Bringen Sie das Rektalgefäß am Genital an und das Genital in der Puppe. Benutzen Sie eine 30ml Einlaufspritze und wechseln Sie die Tücher nach jedem Einlauf aus.



«Nach der Übung»

Entfernen Sie die Tücher aus dem Gefäß. Reinigen Sie Genital und Gefäß mit milder Seifenlösung. Nach dem Trocknen das Gefäß am Genital anbringen und beides lagern.




Achtung

Benutzen Sie das mitgelieferte Gleitmittel. Gleitgel oder andere Gleitmittel können sich ablagern und Schäden verursachen.

1 Magensonde

Künstliche Ernährung kann durch Einführen einer Magensonde (nasal oder oral) sowie mit PEG geübt werden. Die Sonden können mit Pflastern fixiert werden. Es kann keine künstliche Nahrung oder Wasser eingebracht werden.

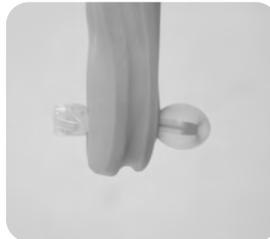

Die Brustwand kann entfernt werden, um den PEG Katheter zu erklären. Die PEG Pflege kann geübt werden.

«Vorbereitung»

Sprühen Sie das mitgelieferte Gleitmittel auf Katheter und in den Mund.



Bringen Sie den PEG Katheter in das PEG Loch ein und blocken Sie den Ballon um den Katheter zu sichern.



«Nach dem Training»

Entfernen Sie den Katheter und die Pflaster, die Sie zur Fixierung benutzt haben.



Achtung

Empfohlene Kathetergröße: 12-14Fr für oralen und nasalen Zugang, 20Fr für PEG
Benutzen Sie das beiliegende Gleitmittel. Gleitgel oder anderes Gleitmittel können Rückstände bilden und Defekte im Innern erzeugen.

1 Luftweg Absaugung (oral), Tubushandhabung zur Absaugung (nasal und Trachestoma)

Künstlicher Schleim im Mund kann unter Verwendung der Mundabdeckung abgesaugt werden.

*Künstlicher Schleim ist optional erhältlich

Die Tubus-Handhabung kann für nasale und Tracheostoma-Absaugung demonstriert werden.



Achtung

Verwenden Sie nasal und im Tracheostoma keine Flüssigkeiten. Achten Sie darauf, die Mundabdeckung zu benutzen, wenn Sie künstlichen Schleim verwenden.

Die Platzierung des Katheters kann nach Öffnen der Brustabdeckung kontrolliert werden.



Tracheostomapflege



«Vorbereitung»

1. Anbringen der Mundabdeckung

- ① Bringen Sie Gleitmittel auf die Rückseite der Abdeckung auf, damit sie gut einzuführen ist.
- ② Falten Sie die Abdeckung und bringen Sie sie in den Mund ein.
- ③ Prüfen Sie den Sitz im Mund.



2. Einbringen des künstlichen Schleims



Spritzen Sie den künstlichen Schleim langsam und vorsichtig ein.

Achtung

Die Mundabdeckung kann nicht eingeführt werden, wenn die Zähne im Mund sind.

1 Luftweg Absaugung (oral), Tubushandhabung zur Absaugung (nasal und Tracheostoma)

3. Vorbereiten des Tracheostoma

① Nehmen Sie den Stöpsel aus dem Tracheostoma.



② Bringen Sie Gleitmittel auf den Tubus* auf und führen Sie ihn in die Öffnung ein.



③ Sichern Sie den Tracheostomatubus.



*Ein Spezialtubus für KEIKO ist auf Anfrage lieferbar.

R16500E Tracheostoma Tubus II

Der Spezialtubus hat eine verschlossene Spitze zum Einfüllen von künstlichem Schleim, so dass die KEIKO Puppe mit Schleim verwendet werden kann.



《Nach der Übung》

1. Entfernen der Mundabdeckung

① Entfernen Sie die Mundabdeckung langsam mit den Fingern.



⚠ Achtung

Bringen Sie die Mundabdeckung mehr als 5 Minuten vor der Übung an, da sie ansonsten durch das frische Gleitmittel während der Übung verrutschen könnte.

Waschen Sie die Mundabdeckung mit Seife oder Neutralreiniger nachdem Sie sie aus der Puppe herausgenommen haben. Lassen Sie die Abdeckung trocknen und lagern Sie sie. Vermeiden Sie Hitze und Feuchtigkeit.

1 Luftweg Absaugung (oral), Tubushandhabung zur Absaugung (nasal und Trachestoma)

2. Entfernen des Tracheostoma-Tubus

① Entfernen Sie den Tracheostoma-Tubus






② Bringen Sie den Stöpsel in der Öffnung an.



Achtung

Es kann vorkommen, dass sich die Kappe auf dem Spezialtubus löst und in den Bronchialbaum fällt. Dies geschieht häufig durch das Gleitmittel. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie die Brustdecke und entfernen Sie die Kappe durch den Bronchus. Reinigen Sie die Kappe und bringen Sie diese wieder am Spezialtubus an.

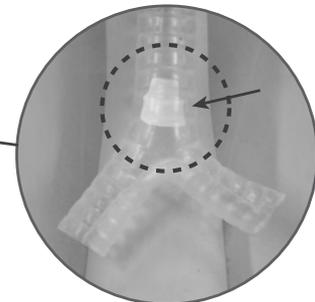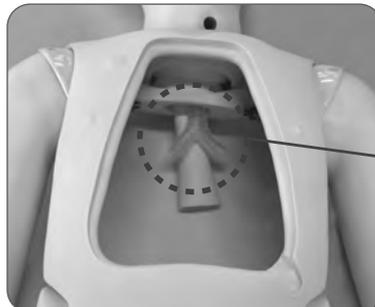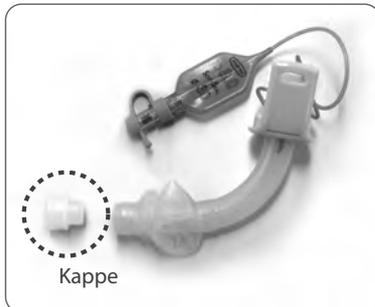

2 Stomapflege

Stomapflege einschließlich des Auswechslens des Stomabeutels ist möglich.

Die Verwendung von künstlichen Stuhl macht die Übung realistischer..

Achtung

Künstlicher Stuhl wird hart wenn er trocknet. Bewahren Sie ihn in einem luftdichten Beutel oder Gefäß auf. Künstlicher Stuhl kann mit Wasser wieder weich gemacht werden.



1 Zäpfchengabe

Benutzen Sie die optional erhältlichen simulierten Zäpfchen zum Einführen.



«Vorbereitung»

1. Stellen Sie sicher, dass das Rektalgefäß fest verschlossen ist.
2. Benutzen Sie das Gleitmittel auf Zäpfchen und Hand zur Übung. Die künstlichen Zäpfchen befinden sich nach der Übung im Rektalgefäß.



« Nach der Übung »

1. Entfernen Sie das Rektalgefäß vom Genital. Reinigen Sie das Rektalgefäß, die künstlichen Zäpfchen und das Genital. Lagern Sie alles, nachdem es sorgfältig getrocknet wurde.



Achtung

Benutzen Sie das mitgelieferte Gleitmittel. Gleitgel oder andere Gleitmittel können sich im Genital absetzen und einen Defekt auslösen.

2 Sauerstoffgabe

Eine Sauerstoffmaske oder eine Nasenkanüle können angebracht werden, um Sauerstoffgabe zu simulieren.



1 ZVK Portpflege

Grundversorgung des ZVK Ports kann simuliert werden .

- Verbandwechsel
- Baden / Waschen

«Vorbereitung»

Die Puppe hat eine Öffnung zum Einbringen einer Huber-Nadel. Benutzen Sie eine 20G oder 22G Huber Nadel für die Puppe. Die Nadel kann mit Pflaster fixiert werden.

«Nach der Übung»

Entfernen Sie Nadel und Pflaster nach der Übung.



Achtung

.....
Markieren Sie niemals Pflaster oder Verbände mit Stiften, die Tine kann auf die Puppe übertragen werden und lässt sich nicht wieder entfernen.
Benutzen Sie Wasser anstelle von Desinfektionslösungen zur Desinfektionsübung.

2 Postmortale Pflege

Das Schließen der Augenlider und das Einbringen von Baumwolle in Ohren, Augen und Anus ist möglich.

«Schließen der Augenlider»

Ziehen Sie den Rand des Augenlids nach unten.

«Öffnen der Augenlider»

Ziehen Sie den Rand des Augenlids nach oben



Achtung

.....
Füllen Sie nicht zu viel Baumwolle in Ohren, Augen und Anus.

1 Zerlegen der Puppe

1. Öffnen Sie die Brustabdeckung und entfernen Sie die Bolzen links und rechts.
Lösen Sie die 2 verschiedenen Muttern mit Hilfe des mitgelieferten Schraubenschlüssels und entfernen Sie die beiden Bolzen.




Achtung

.....
Bewahren Sie die das
Werkzeug und die
Montage Teile
sorgfältig auf.



2. Trennen Sie Ober- und Unterkörper.

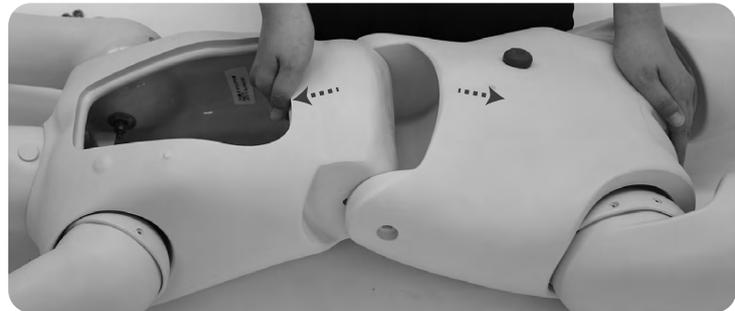

2 Lagerung

1. Wickeln Sie den Unterkörper in die Plastikfolie und legen Sie ihn in den Karton. Bringen Sie die Polster unter den Knien an.



2. Fixieren Sie den Unterkörper mit den Teilern.



Achtung

.....
Verwenden Sie immer die Plastiktüte, damit die Puppe nicht in direkten Kontakt mit dem Karton kommt. Dies könnte zu Verschmutzungen führen.

2 Lagerung

3. Legen Sie den horizontalen Teiler ein.



4. Packen Sie Kopf und Arme in die Plastiktüten. Legen Sie die Plastikfolie in den Karton und legen Sie die Puppe darauf.



5. Wickeln Sie die Puppe in die Plastikfolie.



6. Fügen Sie die Teiler ein und legen Sie die Einzelteile neben den Kopf.



Achtung

.....
Lagern Sie die Puppe nicht mit angebrachter Perücke. Lagern Sie die Perücke separat wie beschrieben.



Caution

Markieren Sie die Puppe nicht mit Kugelschreiber und bringen Sie die Puppe nicht mit gedruckten Dingen (Anleitung, Buch, Zeitung oder ähnliches) in Berührung. Die Farbe verbindet sich mit dem Kunststoff und kann nicht entfernt werden.

Ersatz- und Verbrauchsteile

Artikel	Bezeichnung
11405-010	Weibliches Genital
11405-020	Männliches Genital
11401-080	Gebiss
11229-060	Mundabdeckung
11229-050	Gleitmittel für Puppe
11381-800	Gleitmittel für Übungen (Katheterisierung, Einlauf und Zäpfchengabe)



Weibliches Genital



Männliches Genital



Gebiss



Mundabdeckung



Gleitmittel für Puppe



Gleitmittel für Übungen (Katheterisierung, Einlauf und Zäpfchengabe)

Optionale Teile

Artikel	Bezeichnung
11404-030	Perücke für Haarpflege
11405-030	Schlafanzug
12746-020	Tracheostomatubus II
11251-320	Künstliche Zäpfchen
11405-040	Künstlicher Stuhl
11229-070	Künstlicher Schleim



Perücke für Haarpflege



Schlafanzug



Tracheostomatubus II



Künstliche Zäpfchen



Künstlicher Stuhl



Künstlicher Schleim

Sollten Sie fragen zum Produkt haben, nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

Der Inhalt dieser Anleitung kann sich aus technischen Gründen ändern.

Kein Teil dieser Anleitung darf ohne Erlaubnis reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden.

Fragen Sie bei uns nach, falls Sie weitere Kopien dieser Anleitung benötigen.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn die Anleitung nicht mit dem Produkt übereinstimmt oder Sie anderes Feedback haben.

Vertrieb Deutschland:

Erler-Zimmer GmbH&Co.KG

Hauptstrasse 27

77886 Lauf, Deutschland

Tel. 07841/6003-0

Mail: info@erler-zimmer.de

www.erler-zimmer.de