

Instru Zym

Produktinformation



Produktbeschreibung

Instru Zym ist ein enzymatischer, schaumarm und materialschonender Instrumentenreiniger in konzentrierter Form.

Anwendungsgebiet

Instru Zym wird zur Reinigung von chirurgischem und orthopädischem Instrumentarium, starren/flexiblen Endoskopen und endoskopischen Zusatzinstrumenten eingesetzt.

Anwendungshinweise

Eine verdünnte Lösung entweder manuell oder geräteseitig durch automatische Dosiersysteme herstellen. Als Verdünnungsmedium kann Leitungswasser von Trinkwasserqualität oder auch voll- oder teilentsalztes Wasser eingesetzt werden. Mit dieser Gebrauchslösung werden die zu reinigenden Instrumente behandelt. Anwendbar bei Wassertemperaturen von 15-35°C.

Hochaktive Enzyme spalten und suspendieren organische Verschmutzungen wie Eiweiß, Blut, Sekrete, Detritus, Gewebereste und Fette.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendungskonzentration:

Je nach Verschmutzungsgrad und Anwendungsart wird das Reinigungsmittel 0,5 bis 5%ig eingesetzt.

Produktsortiment und Spezifikation

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
600002	1 L	Flasche	10 x 1 L
601488	2 L	Kanister	6 x 2 L
600001	5 L	Kanister	2 x 5 L



Instru Zym

Produktinformation



Medizinproduktklasse

I

Inhaltsstoffe

Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, nichtionische Tenside, Konservierungsstoffe, Duftstoffe, gereinigtes Wasser

Chemisch-physikalische Daten

Farbe leicht gelblich
Aussehen klar
Zustand flüssig
pH-Wert (20°C) 5,5 - 6,5
Dichte (20°C) 1,015 - 1,026 g/ml

Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit
 24 Monate
Haltbarkeit im Anbruchgebinde
 12 Monate
 Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Anforderungen an die Lagerumgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff. Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

Beschreibung	Einheit	Wert
Temperaturgrenzen für die kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.)	[°C]	0 - 40 ¹⁾
Umgebungstemperatur für die dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min. - Max.)	[°C]	20 - 25

¹⁾ Eine kurzzeitige Lagerung (höchstens 24 h) bis maximal 40 °C hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit des Produkts.

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Informationen

Weiterführende Informationen finden Sie im Internet auf unserer Homepage:
www.drdeppe.de
 Spezielle Anfragen richten Sie bitte an:
info@drdeppe.de



Laboratorium Dr. Deppe GmbH
 Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen
T +49 (0) 2152 5565-0 **W** www.drdeppe.de