


Technisches Datenblatt

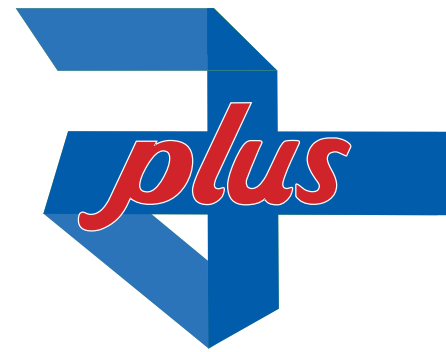

MaiMed® MyClean DS

Schnelldesinfektion

Alkoholische Schnelldesinfektion

Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid und tuberkulozid (inkl. M.-terrae)
- Wirkt begrenzt viruzid PLUS (HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren) (behüllte Viren gemäß RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno- und Corona-Viren (SARS-CoV-2 + VOC)
- Für die Tränkung von Tüchern geeignet
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Aldehy-, QAV- und rückstandsfrei
- VAH-gelistet



Anwendung:

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkohol- und wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten sowie Gegenständen in Kliniken, Praxen, patientennahem Umfeld und im Lebensmittelbereich (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.). Materialbeständigkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen. Flächen vollständig abwischen und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Ggf. mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Bei Flächen und Arbeitsgeräten, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, ist kein Abspülen/Nachwischen erforderlich.


Ausführungen:

MaiMed® MyClean DS – Schnelldesinfektion

Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Schnelldesinfektion	Neutral	500 ml	79609	4046153115983	10305717	18 Flaschen
Schnelldesinfektion	Neutral	1 l	79610	4046153116102	10305723	12 Flaschen
Schnelldesinfektion	Neutral	5 l	79611	4046153116126	10305746	2 Kanister
Schnelldesinfektion	Neutral	10 l	79612	4046153116140	10305752	1 Kanister

Wirksamkeiten gem. EN-Normen und Richtlinien der VAH:

Wirksamkeiten für den Hygienebereich	
Bakterizid, levurozid mit Mechanik (EN 13624, EN 13727 und EN 16615; hohe Belastung):	1 Minute
Mykobakterizid (nach VAH-Methode; hohe Belastung):	5 Minuten
Tuberkulozid (EN 14348; geringe Belastung):	1 Minute
Wirksamkeiten für den Lebensmittelbereich	
Bakterizid, levurozid ohne Mechanik (EN 1276, EN 1650 und EN 13697; niedrige Belastung):	5 Minuten
Viruzidie nach EN 14476	
Begrenzt viruzid PLUS:	1 Minute
Vaccinia-Viren (geringe Belastung):	1 Minute
Adeno-Viren (geringe Belastung):	1 Minute
Noro-Viren (geringe Belastung):	1 Minute

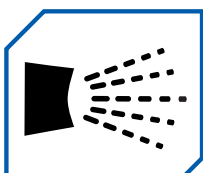

MaiMed® GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen – Germany

MaiMed® MyClean DS-Schnelldesinfektion-2022-02

Technisches Datenblatt



MaiMed[®] MyClean DS Schnelldesinfektion

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 50 g Ethanol

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

eClass: 30-30-01-02

Biozid-Nr.: N-96184

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Halbbarkeit nach Anbruch:  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:

CE
0482


MD




UN 1170



UFI: D5C0-Y0J6-J007-TKUA
Achtung

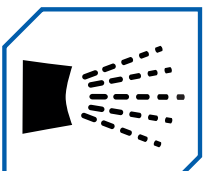

 MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen – Germany

MaiMed[®] MyClean DS-Schnelldesinfektion-2022-02