


Technisches Datenblatt

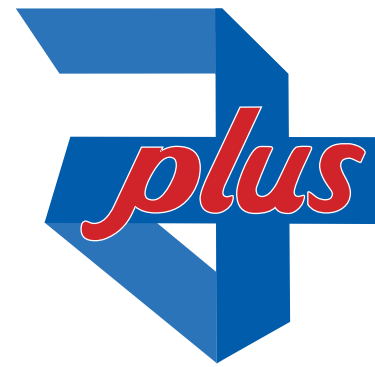

MaiMed® MyClean DS ViruComplete Desinfektionstücher

Gebrauchsfertige, alkoholische, aldehydfreie Desinfektionstücher zur Desinfektion alkoholbeständiger Oberflächen

Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

Für den professionellen Gebrauch

120 Tücher (15 cm x 18 cm)

- Wirkt viruzid gemäß EN 14476 (Adenovirus Typ 5, Polyomavirus SV40, Murines Norovirus, Poliovirus Typ I)
- Wirkt bakterizid, levurozid und fungizid
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Aldehydfrei

Anwendung:

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen.

Ausführung:

MaiMed® MyClean DS ViruComplete

Artikelbeschreibung	Tuchgröße	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	15 x 18 cm	120 Blatt	179623	4046153116331	10305887	12 Pack

Einwirkzeiten:

	Belastung	Normen	Einwirkzeiten
Bakterizid (mit Mechanik)	hohe Belastung	EN 13727*, 16615	1 Minute
Levurozid (mit Mechanik)	hohe Belastung	EN 13624*, 16615	1 Minute
Fungizid (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis)	hohe Belastung	EN 13624*	5 Minuten
Begrenzt viruzid (Vaccinia Stamm Elstree, BVDV Stamm NADL)	10% FKS (fötales Kälberserum)	DVV/RKI*	1 Minute
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)	10% FKS (fötales Kälberserum)	DVV/RKI*	1 Minute
Viruzid / wirksam gegen Polyomavirus SV40	10% FKS (fötales Kälberserum)	DVV/RKI*	5 Minuten
Viruzid (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus, Poliovirus Typ I)	niedrige Belastung	EN 14476*	5 Minuten

* an der Tränklösung getestet

Zusammensetzung:

100 g Tränklösung sind enthalten:

Wirkstoff: 63,50 g Ethanol; 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de

Technisches Datenblatt



MaiMed[®] MyClean DS ViruComplete Desinfektionstücher

Qualitätssicherung: Biozidverordnung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Beim Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise gemäß Gefahrenstoffverordnung im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Biozid Reg. Nr.: N-103524

eClass: 30-30-01-02

Verwendbarkeit: 2 Jahre

Haltbarkeit nach Anbruch: Innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole:



MaiMed[®] GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen
Germany | Tel.: +49 5195 9707-0 | www.MaiMed.de

TD-MaiMed[®] MyClean-DS-ViruComplete-REV02-20220906