

Medizid Alpha+ XXL Tücher

Alkoholfreie Desinfektionstücher für wischbeständige Oberflächen und Gegenstände



Technische Informationen

REF	Artikel	Tuchgröße	Verpackung	PZN
00969+	Tücher im Eimer	26 x 29 cm	70 Tücher pro Eimer / 1 Eimer pro Karton	16015162
00970+	Nachfüllpackung	26 x 29 cm	70 Tücher pro Rolle / 6 Rollen pro Karton	16015179

Anwendungskonzentration / Einwirkzeiten

Bakterizid, levurozid (mit Mechanik, hohe Belastung)	1 Min.
Bakterizid, levurozid (ohne Mechanik, hohe Belastung)	1 Min.
Begrenzt viruzid (Midified Vaccinia Ankara (hohe Belastung))	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus (hohe Belastung))	60 Min.
Tuberkulozid (M. terrae)	60 Min.

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung Medizid Alpha+ ist ein flüssiges, alkohol- und aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel in gebrauchsfertiger Form. Nur für den professionellen Gebrauch.

Anwendung Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen, sowie in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Ausgeschlossen sind Oberflächen von Instrumenten und semikritischen und kritische Medizinprodukte.

Beachten Sie die im medizinischen Umfeld geltenden, besonderen Anforderungen an die Hygiene bei der Desinfektion von Flächen (in Deutschland: die Empfehlungen der KRINKO zum Thema Flächendesinfektion, oder die Empfehlung des VAH bei routinemäßiger Desinfektion). Das gebrauchsfertige Produkt kann im Sprühverfahren, im Wischverfahren mit Hilfe eines Einmaltuchs/Mopps, oder in einer Kombination aus Sprüh-/ Wischverfahren verwendet werden. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen. Die Flüssigkeitsmenge, die auf die Oberfläche aufgebracht werden muss, ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte. Im Lebensmittelbereich die Flächen abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen.

Inhaltsstoffe / Ingredients In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
0,1 g 2-Phenoxyethanol, 0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Haltbarkeit 3 Jahre, Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff. Beachten Sie die Temperaturgrenzen für die Lagerung:

Temperaturgrenzen für die kurzzeitige Lagerung: 0 – 40 °C
(eine kurzzeitige Lagerung (höchstens 24h) bis maximal 40 °C hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit des Produktes.

Temperaturgrenzen für die dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit: 20 – 25 °C

Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Monate. Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig wiederverschließen.

Entsorgung Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Regulatorische Informationen

Kategorie	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG
-----------	--

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.